

FICHA TECNICA

SANIT SURFA

Propriedades

Espuma desinfetante para uso hospitalar

CE (ON 0318)

CE (ON 0318)

Características

ASPECTO	TRANSPARENTE
COR	INCOLOR
ODOR	CARACTERISTICA
DENSIDADE	1.000 ±0.02
PH	6.43 ±0.5
% CATIONICO (EXTERNO)	0.82 ±0.18
% BIGUANIDE (EXTERNO)	0.295 ±0.205

Aplicações

Produto indicado para a desinfecção de equipamentos e elementos sanitários não invasivos. Ideal para a desinfecção de macas, incubadeiras, termómetros, fonendoscópios, mesas RX, equipamentos de RMN - TAC, lâmpadas de cirurgia e monitores.

Para sua aplicação em hospitais, salas de cirurgia e centros médicos. Eficácia testada conforme a normativa europeia UNE-EN 14561 bactericida: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae e UNE-EN 14562 levuricida: Candida albicans

Dosagem e modo de emprego

Limpar previamente a zona a tartar, antes de proceder a desinfecção. Aplicar Sanit SURFA sobre a superfície ou utensilio a desinfetar e esfregar com um pano limpo, para conseguir um efeito homogéneo. Deixar atuar durante 5 minutos para conseguir a eficacia bactericida e levuricida. Não é necessário enxaguar. Apto para aplicar sobre o alumínio, aço inoxidável, cromo, tungsteno, metacrilato, polietileno e vidro. Produto a base de água, pode criar corrosão a longo prazo, em superfícies férricas e de níquel. Para garantir a sua eficacia, evitar temperaturas superiores aos 40 °C. Não reutilizar a embalagem depois de vazia.

Contem outros componentes Aplicações

<1% tensoactivo catiónico. <0,5% Poliaminopropil biguanida.